



**Wartner®
Stift gegen
Warzen
(1.5ml)**

Zur Entfernung von Warzen ausschließlich an Händen und Fußsohlen

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH UND VERMEIDEN SIE EINEN UNSACHGEMÄßEN GEBRAUCH DES WARTNER STIFTS GEGEN WARZEN.

Das Gel im Stift ist hochkonzentriert, sodass nur so viel aufgetragen werden darf, bis die gesamte Oberfläche der Warze von einem DÜNNEN FILM des Gels bedeckt ist. Vermeiden Sie Kontakt mit der gesunden Haut, die die Warze umgibt. Falls das Gel mit gesunder Haut in Kontakt kommt, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife.

A. Hintergrundinformationen zu Warzen

Warzen sind harmlose Hautwucherungen, die von Humanpapillomaviren (HPV) verursacht werden. Es gibt eine Vielzahl von Warzenarten, aber die gängigsten sind gewöhnliche Warzen und Dornwarzen. Es sind gutartige Geschwüre, die aus einem Kern von Bindegewebe mit Blutgefäßen bestehen und umhüllt sind von Epithelgewebe.

Gewöhnliche Warzen können an ihrer "blumenkohlähnlichen" Oberfläche erkannt werden. Sie treten normalerweise an Händen und Füßen, aber auch Knien und Ellbogen auf. Dornwarzen sind ähnlich den gewöhnlichen Warzen, treten aber nur an Druckstellen unter den Füßen (Ferse, Fußballen oder Zehen) auf. Dornwarzen haben eine flache, glatte Oberfläche, sind oft von Hornhaut und Schwielen bedeckt und wachsen dornartig in die Tiefe, daher können sie beim Gehen starke Schmerzen verursachen.

7-10% der Gesamtbevölkerung sind in ihrem Leben mindestens einmal von Warzen betroffen, besonders Kinder und Jugendliche. Warzen sind äußerst ansteckend und treten umso häufiger auf, je schwächer das Immunsystem ist. Sie können sich durch Berührung oder Kontakt mit Haut bzw. Hautschüppchen von einer Person zur Nächsten verbreiten oder auch von einem Körperteil auf ein Anderes ausbreiten. Mehr als 50% aller Warzen verschwinden innerhalb von 2 Jahren ohne Behandlung. Wie dem auch sei, Warzen sind unansehnlich und können im Fall von Dornwarzen sogar Schmerzen verursachen. Daher entscheiden sich Betroffene oft dafür, etwas gegen ihre Warzen zu tun anstatt abzuwarten, bis sie eventuell von selbst verschwinden.

Warzen werden traditionell hauptsächlich auf zwei Arten behandelt: Mit flüssigen Säure-Tinkturen, welche direkt auf die Warze aufgetragen werden, oder durch eine Behandlung beim Arzt in Form von Laser, Ausbrennen, Vereisung (oft mit Flüssigstickstoff) oder gar einem chirurgischen Eingriff.

Der Wartner® Stift gegen Warzen ist eine wirksame und einfach anzuwendende Alternative für zuhause und beinhaltet ein hochkonzentriertes Gel zur Entfernung von Warzen.

B. Was ist der Wartner® Stift gegen Warzen und wie funktioniert er?

Der Wartner® Stift gegen Warzen ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen (verruca vulgaris) und Dornwarzen (verruca plantaris) an Händen und Fußsohlen. Der Stift enthält ein hochkonzentriertes Gel zur Entfernung von Warzen. Das Gel bewirkt eine Ablösung der Hautschichten und ermöglicht so die Bekämpfung des ursächlichen Virus. Nach Entfernung der Warze wird sich neue, gesunde Haut bilden.


C. Wann darf der Wartner® Stift gegen Warzen NICHT angewendet werden?

- AUSSCHLIEßLICH an Händen und Fußsohlen anwenden.
- NICHT für die Behandlung von Dellwarzen geeignet.
- NICHT im Gesicht, an den Genitalien oder auf empfindlicher Haut anwenden.
- NICHT in Kombination mit anderen Mitteln zur Warzentfernung anwenden.
- NICHT anwenden auf Muttermalen, Leberflecken, Wasserwarzen (mollusca contagiosa), seborrhoischen Warzen (verruca seborrhoicae), Sommersprossen oder zur Entfernung von sonstigen Hautgebilden.
- NICHT bei Kindern unter 4 Jahren anwenden.
- Während der Schwangerschaft und Stillzeit, wenn Sie Diabetiker sind, an anderen Hauterkrankungen leiden, oder falls irgendwelche Zweifel daran bestehen, ob es sich um eine Warze handelt, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker vor der Anwendung.

D. Anwendung

Wenn Sie den Wartner® Stift gegen Warzen zum ersten Mal benutzen, ist es notwendig, das Stifende vollständig im Uhrzeigersinn zu drehen, bis das Gel in den Präzisionsapplikator fließt und dort ein erster Tropfen sichtbar ist. Dazu sind meist mehrere vollständige Drehungen erforderlich. Bei folgenden


Anwendungen das Stifende langsam drehen, bis sich ein Tropfen bildet, der dann vorsichtig auf die Warzenoberfläche aufgetragen werden kann. Falls versehentlich ein zu großer Tropfen entsteht und/ oder zu viel Gel aufgetragen wird, reinigen Sie die betroffene Stelle umgehend gründlich mit reichlich Wasser und Seife. Anschließend können Sie vorsichtig die korrekte Menge Gel auf die Warze auftragen.

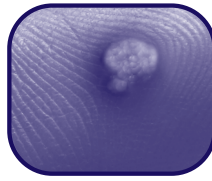

E. Üblicher Heilungsverlauf


Vor der Anwendung

Gewöhnliche Warzen bestehen aus einem Kern von Bindegewebe mit Blutgefäßen und sind umhüllt von Epithelgewebe.

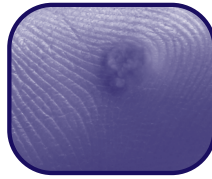

Während der Anwendung

Die obere Hautschicht der Warze schält sich. Durch geronnenes Blut unter der Warze kann sich dunkle, braune und verdickte Haut bilden. Die Haut wird sich weiter ablösen. Dies ist die übliche Folge der Zerstörung des Gewebes durch das TCA-Gel und ein positives Zeichen im Entferungsprozess der Warze. Diese Phase kann mehrere Wochen andauern.

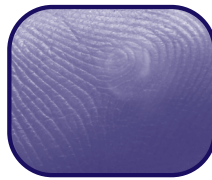

Nach der Anwendung

Die Warze wird Stück für Stück abgetragen und es bildet sich neue, gesunde Haut. Es kann mehrere Wochen dauern bis die Haut vollständig verheilt ist.

F. Warnhinweise

- Trichloressigsäure (TCA) ist eine stark ätzende Säure. Tragen Sie TCA nur direkt auf die Warze auf und nicht auf die gesunde Haut, die die Warze umgibt, da ansonsten eine Verätzung eintreten könnte. Daher sollte TCA immer äußerst sorgfältig aufgetragen werden, ganz besonders auf Kinderhaut, die extrem empfindlich ist.
- Sie können die umliegende Haut mit einer fetthaltigen Creme vor Kontakt mit dem Gel schützen.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Falls versehentlich ein zu großer Tropfen entsteht und/ oder zu viel Gel aufgetragen wird, reinigen Sie die betroffene Stelle umgehend gründlich mit reichlich Wasser und Seife. Anschließend können Sie vorsichtig die korrekte Menge Gel auf die Warze auftragen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Gels mit Kleidungsstücken, sonstigen Textilien, Schmuck oder Möbeln, da es diese beschädigen könnte.
- Falls sich die behandelte Stelle entzündet, rot verfärbt oder schmerzt, reinigen Sie die Stelle mit reichlich Wasser und Seife und konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
- Falls Sie sich nicht an diese Gebrauchsanweisung halten, kann dies zu Hautreizungen, Brennen und Schmerzen führen.
- Sollten Sie nach einer oder auch mehreren Anwendungen eine Rötung oder Reizung feststellen, beenden Sie die Anwendung.
- Übermäßige Anwendung des Gels kann zu Reizungen führen.
- Nicht auf gereizter, infizierter oder geröteter Haut und nicht bei Anzeichen von Entzündungen wie Juckreiz oder Schwellungen anwenden.
- Auf dünner oder trockener Haut besonders vorsichtig anwenden.
- Die Behandlung von Warzen bei Kindern darf nur unter elterlicher Aufsicht erfolgen.
- Falls die Warze nach 4 Anwendungsintervallen noch nicht erfolgreich entfernt worden sein sollte, konsultieren Sie bitte einen Arzt.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.
- Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.
- Aus hygienischen Gründen sollte der Stift nur von einer Person verwendet werden. Falls der Stift für die Entfernung mehrerer Warzen angewendet worden ist, sollte das Produkt nach Abschluss der Behandlung aus hygienischen Gründen auch vor Ablauf des Verfallsdatums entsorgt werden.

G. Nebenwirkungen

- Es ist wichtig, dass das Produkt exakt der Gebrauchsanweisung entsprechend angewendet wird, da ein übermäßiger Kontakt mit der Formulierung vorübergehend zu einem stechenden, brennenden Gefühl, Schmerz, leichter Eiterbildung sowie Hautverfärbungen führen kann.
- Die Haut kann sich unmittelbar nach der Anwendung kurzzeitig dunkel verfärben.
- Die behandelte Stelle sollte vor direktem Sonnenlicht oder UV-Strahlen geschützt werden, da dies zu einer Hyper- bzw. Hypopigmentierung führen kann.

H. Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur an einem sicheren, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren (15-25°C). Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Stift nach der Anwendung fest verschließen. Sobald die Behandlung abgeschlossen ist, den Präzisionsapplikator an der Applikatorspitze vor der Aufbewahrung sorgfältig mit einem Papiertuch reinigen.

Aktiver Inhaltsstoff:

Trichloressigsäure

Medical Brands Innovations B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, NL
Vertrieb DE: Omega Pharma Deutschland GmbH, Benzstraße 25, 71083 Herrenberg
Vertrieb AT: Omega Pharma Austria Health Care GmbH, Rennweg 17, A-1030 Wien
Vertrieb CH: Interdelta SA, Rte André-Piller 21, 1762 Givisiez / FR
Weitere Informationen: www.wartner.com



Stand der Informationen: Dezember 2016

EINFACHE ANWENDUNG IN 4 SCHRITTEN

SCHRITT 1



Klick

Halten Sie den Stift senkrecht mit dem Präzisionsapplikator nach unten. Drehen Sie das obere Stifende langsam im Uhrzeigersinn. Bei der ersten Anwendung ist es notwendig vorsichtig am oberen Stifende im Uhrzeigersinn zu drehen bis das Gel in den Präzisionsapplikator geflossen ist. Es können mehrere Umdrehungen nötig sein, bis der erste Tropfen zu sehen ist.

SCHRITT 2



Lassen Sie das Gel in die Spitze des Applikators fließen, bis ein erster Tropfen sichtbar ist.

SCHRITT 3



Tragen Sie das Gel vorsichtig ausschließlich auf die Warze auf (nicht auf die umliegende gesunde Haut). Achten Sie darauf, dass die gesamte Oberfläche der Warze von einem dünnen Film des Gels bedeckt ist. Je nach Größe der Warze kann dafür einer oder auch mehrere kleine Tropfen benötigt werden.

SCHRITT 4



10-15 min.

Lassen Sie das Gel 10 - 15 Minuten trocknen, bevor Sie duschen, schwimmen, Kleidung anlegen oder Schuhe anziehen. Wiederholen Sie die Anwendung 2-mal täglich.

Nach der 4-tägigen Anwendung wird sich die Haut in den folgenden 4 Tagen nach und nach lösen und kann vorsichtig mit lauwarmem Wasser entfernt werden. Nach der Anwendung wird sich neue, gesunde Haut bilden. Die Entfernung der Warze kann bereits nach der ersten Anwendungswoche erfolgreich abgeschlossen sein. Falls die Warze nicht vollständig entfernt wurde, kann die Behandlung nach einer Anwendungspause von 4 Tagen wiederholt werden. Insgesamt darf eine Warze bis zu maximal 4-mal behandelt werden.

Nach ein paar Anwendungstagen kann sich die Oberfläche der Warze dunkel verfärben. Dies ist eine normale Phase im Heilungsprozess. Es kann einige Wochen dauern, bis die Haut vollständig verheilt ist.

Falls die Warze klein ist (wie ein Nadelkopf), nur einmal täglich einen kleinen Tropfen des Gels auf die Spitze der Warze auftragen.

Falls die Warze von Hornhaut bedeckt ist, ist es ratsam, den Fuß vor der Anwendung für einige Minuten in warmes Wasser zu tauchen und die Hornhaut anschließend mit einer speziellen Feile oder einem Bimsstein zu entfernen.

Nach der Anwendung kann ein leichter Schmerz auftreten, wenn die Stelle Druck oder Reibung ausgesetzt wird. Sie können hier Abhilfe schaffen, wenn Sie ein Komfortpflaster zum Schutz anbringen.

ACHTUNG

- Falls die Warze klein ist (wie ein Nadelkopf), nur einmal täglich einen kleinen Tropfen des Gels auftragen.
- Das Gel im Wartner® Stift gegen Warzen ist hochkonzentriert. Bei jeder Anwendung darf nur genau so viel Gel aufgetragen werden, wie nötig ist, um die gesamte Oberfläche der Warze zu bedecken.
- Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, reinigen Sie die Spitze des Applikators sorgfältig mit einem Papiertuch.
- Die gesunde Haut, die die Warze umgibt, DARF NICHT mit dem Gel in Kontakt kommen.
- Nur zur Anwendung bei Warzen an Händen und Fußsohlen.
- Um Infektionen vorzubeugen empfehlen wir besonders an der behandelten Stelle auf Hygiene zu achten.

LFO0820B
ISWP.OM.DE.AT.100

CE 0086

Printproof

ATTENTION!

We need an approved proof before we can start the production.
Please fill in this form in clear writing.

Date:	19-12-2016	Proof no.: 1
Order no.:	323972	
Product Code:	129228/15WP.OM.DE.AT.I.00 MB W	
Article no. Dobber:	D00190	
Size:	210 x 297 mm	DOBBER HEALTHCARE LEAFLETS
Folded:	105 x 25 mm	
Print color(s)		Dobber Healthcare Leaflets BV
Front:	PMS 275 ■	Westerwerf 13
Back:	-	1911 JA Uitgeest
Square (oversteek):	-	Phone +31 (0)251 31 19 50
Optical code:	-	Fax +31 (0)251 31 39 45
pharma code:	-	E-mail: info@dobberpharma.com
Font:	-	www.dobberpharma.com
Font size:	-	
Leading:	-	

To be filled in by client

Approved: YES NO

Date:

Name and signature:

[This form belongs to SOP 'Werkzaamheden DTP-Studio'.]



Mac 05082016, 8

Zonder ril