

BIGUANELLE®

Isotonische gynäkologische Lösung, pH 4,0

ZUSAMMENSETZUNG

Hydroxyethylcellulose	0,60 g
Milchsäure	0,20 g
Glycerol	2,00 g
Kaliumchlorid	0,15 g
Natriumedetat	0,10 g
Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid (PHMB)	0,10 g
gereinigtes Wasser	auf 100 ml

KATEGORIE

Medizinprodukt

EIGENSCHAFTEN

BIGUANELLE® unterstützt die Wiederherstellung des natürlichen Zustandes in der Scheide während der Behandlung einer Scheideninfektion oder im Zuge von physikalischen oder medikamentösen Behandlungen. BIGUANELLE® enthält Polihexanid (PHMB), ein antibakteriell wirksamer Bestandteil, der sich durch seine hohe Verträglichkeit bei Anwendung auf der Schleimhaut auszeichnet.

DARREICHUNGSFORM

Flasche mit 100 ml Lösung

KLINISCHE ANGABEN

ANWENDUNGSGEBIETE

Behandlung von Vulvovaginitis und Cervicovaginitis jeglicher Ursache durch Wiederherstellung und Erhaltung des natürlichen Scheidenmilieus. Unterstützende Funktion im Prozess der Wundheilung durch Schutz und Barriereaufbau nach physikalischen Eingriffen (DTC, Lasertherapie, Kryotherapie).

GEGENANZEIGEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

NEBENWIRKUNGEN

In einigen Fällen wurden Anzeichen von Unverträglichkeit (Brennen, Hautreizung) ohne wesentliche Folgen beobachtet. In diesen Fällen kann die Behandlung unverändert fortgesetzt werden. Trotzdem sollten Patientinnen ihren Arzt oder Apotheker über Nebenwirkungen, die mit dem Produkt in Zusammenhang stehen könnten, informieren.

VERKEHRSTÜCHTIGKEIT UND DAS BEDIENEN VON MASCHINEN

Biguanelle® hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.


ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Biguanelle® wird einmalig angewendet. Nach ärztlichem Rat kann eventuell eine wiederholte Anwendung nach vier Tagen erfolgen.

GEBRAUCHSANWEISUNG



1) Entfernen Sie den Sicherheitsverschluss durch seitliches Drücken.

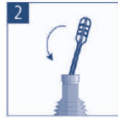

2) Ziehen Sie die Kanüle aus der Schutzhülle und führen sie in die Flasche ein bis sie sicher und stabil sitzt.

3) Begeben Sie sich in eine bequeme Position, um die Lösung anwenden zu können.

4) Führen Sie die Kanüle vorsichtig bis zur Hälfte ihrer Länge in Ihre Scheide ein.

5) Drücken Sie die Flasche zusammen bis sie vollständig entleert ist. Belassen Sie die Lösung für einige Minuten in der Scheide, damit sie ihre Wirkung vollständig entfalten kann.

Befolgen Sie eventuelle Anweisungen Ihres Arztes.

WARNHINWEISE

Nur zur einmaligen Anwendung. Entsorgen Sie anschließend die Flasche mit dem Restinhalt.

Eine längere Anwendung topischer Produkte kann Ursache für allergische Reaktionen sein; beenden Sie in diesem Fall die Behandlung und suchen Sie einen Arzt zur Ergreifung geeigneter Gegenmaßnahmen auf. BIGUANELLE® ausschließlich vaginal anwenden.

Eine Anwendung in der Schwangerschaft sollte nur in Ausnahmefällen und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.

Bei normaler Anwendung wurden keine Fälle von Überdosierung beobachtet.

Nicht verwenden bei bestehender Allergie auf einen der Inhaltsstoffe.

Das Produkt nicht nach dem Ablaufdatum, das auf dem Faltkarton aufgedruckt ist, verwenden.

Das Produkt nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht schlucken.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bei Zimmertemperatur vor Licht und Hitze geschützt aufbewahren.

INHALT DER PACKUNG

1 Flasche mit 100 ml Lösung und 1 Vaginalkanüle CE - Hersteller INGE spa

Via Garibaldi 190, 20024 S. Maria Rossa di Garbagnate Mianese (MI), Italien

Datum der letzten Überarbeitung: 09/02/2015

CE 0373

Lo.Li. 
Pharma
INTERNATIONAL

Hersteller: Lo.Li. Pharma Srl - Via dei Luxardo, 33 - 00156 Rom, Italien

Vertrieb in Österreich:
Karmed HandelsgesmbH
Arsenal Objekt 3, Top 15
1030 Wien
Österreich

Vertrieb in Deutschland:
Marckyril Pharma GmbH
Kapt.-Rüter-Strasse 53
D-26871 Papenburg
Deutschland

43202 0113