

AUDIBABY



 Laboratoires Diepharmex S.A.
Avenue Rosemont, 8
1208 Geneva, Switzerland
Tel.: +41 (0) 22 718 64 20
info@diepharmex.com

AUDISPRAY.COM



300359
AB.NOT.08.2019 Rev4 DI6431

DE AUDIBABY

AUDIBABY ist eine hypertonische Lösung aus mikrobiologisch kontrolliertem Meerwasser. Dank des Gehalts an Ionen und Spurenelementen eignet sich die Lösung zur sanften Ohrenreinigung von Säuglingen und Kleinkindern.

Was ist AUDIBABY?

AUDIBABY hält die Ohren von Babys und Kleinkindern sauber, befreit den Gehörgang von Verunreinigungen (Ohrenschmalz, Hautschuppen, Haare usw.) und ermöglicht so den natürlichen Abfluss nach außen. AUDIBABY erleichtert ärztliche Untersuchungen des Trommelfells. Saubere Ohren fördern ein gutes Gehör. Bei regelmäßiger Anwendung beugt AUDIBABY der Ansammlung von Ohrenschmalz vor. AUDIBABY berücksichtigt die empfindlichen Ohren ab der Geburt. AUDIBABY wird in Einzeldosen zum Einmalgebrauch für die regelmäßige, praktische Ohrenhygiene angeboten.

Wer kann AUDIBABY verwenden?

0 bis 12 Monate: 6 bis 10 Tropfen in jedes Ohr träufeln, ein Mal wöchentlich
12 bis 36 Monate: 1 halbe Einzeldosis in jedes Ohr träufeln, ein Mal wöchentlich

Wie wird AUDIBABY angewendet?

- Lösen Sie eine Einzeldosis aus der Verpackung.
- Wärmen Sie die Einzeldosis einige Sekunden lang in der Handfläche an, um die Anwendung für das Kind angenehmer zu gestalten.
- Legen Sie das Baby auf die Seite. Öffnen Sie die Einzeldosis und platzieren Sie sie an der Öffnung. Leicht auf die Einzeldosis drücken, damit einige Tropfen austreten.
- Massieren Sie den Ohrenansatz für optimale Wirkung 10 Sekunden lang, bevor Sie überschüssige Flüssigkeit abwischen.
- Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Ohr und entsorgen Sie die Einzeldosis.

Gegenanzeigen

Nicht bei Mittelohrentzündung und im Allgemeinen bei medizinischer Vorgeschichte oder medizinischem oder chirurgischem Eingriff am Ohr oder Trommelfell anwenden.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch

Wenden Sie sich bei Fragen zum Gebrauch des Produkts an Ihren Arzt oder Apotheker. Überschreiten Sie nicht das auf der Verpackung angegebene Haltbarkeitsdatum. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Alle schwerwiegenden, mit AUDIBABY zusammenhängenden Zwischenfälle müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes gemeldet werden, in dem der Benutzer wohnhaft ist.

VERWENDEN SIE FÜR KINDER AB 3 JAHREN AUDISPRAY JUNIOR

AUDIBABY ist ein Medizinprodukt