

Clearblue Ovulationstest Fortschrittlich & Digital



Wünschen Sie sich ein Baby?

Wenn Sie darüber nachdenken jetzt oder in absehbarer Zukunft ein Kind zu bekommen, können Sie Ihre Chancen maximieren, indem Sie den Eisprung präzise bestimmen. Der Clearblue Ovulationstest Fortschrittlich & Digital ist der einzige Test, der vier oder mehr fruchtbare Tage pro Zyklus* ermitteln kann, nämlich die Tage vor dem Eisprung und den Eisprungtag selbst. Bei diesem Test werden zwei wichtige Fruchtbarkeitshormone gemessen im Gegensatz zu nur einem wie bei vielen anderen Ovulationstests. Sie können nur an wenigen Tagen in jedem Zyklus schwanger werden und jede Frau ist einzigartig, so dass der Unterschied darin bestehen kann, Ihre besten Tage für eine Empfängnis im Voraus zu kennen.

Vorteile vom Ovulationstest Fortschrittlich & Digital

- Der einzige Test, der die zwei wesentlichen Fruchtbarkeitshormone zuverlässig misst
- Kann vier oder mehr fruchtbare Tage identifizieren für mehr Möglichkeiten schwanger zu werden. In einer Studie mit 87 Frauen wurden in 80 % der Zyklen vier oder mehr fruchtbare Tage erkannt.*
- Über 99% zuverlässig im Aufspüren des LH-Anstiegs vor dem Eisprung

*In einer Studie mit 87 Frauen wurden in 80 % der Zyklen vier oder mehr fruchtbare Tage erkannt. Gemessen an tatsächlichen Zykluslängen (2012).

Entdecken Sie die Vorteile

Über 99 % zuverlässig in der Erkennung des LH-Anstiegs




Das Aufspüren des plötzlichen Anstiegs des luteinisierenden Hormons 24-36 Stunden vor dem Eisprung ist die zuverlässigste Methode für die Anwendung zu Hause, um Ihre fruchtbarsten Tage zu bestimmen – sie ist nachgewiesen zwei Mal zuverlässiger

Kann vier oder mehr fruchtbare Tage identifizieren*



Dies ist der einzige Ovulationstest, der vier und mehr Tage hoher und maximaler Fruchtbarkeit identifizieren kann (die exakte Anzahl ist individuell verschieden). Dies bedeutet, dass Sie ihre fruchtbarsten Tage im Voraus kennen, so dass Sie planen

Misst die zwei wesentlichen Fruchtbarkeitshormone

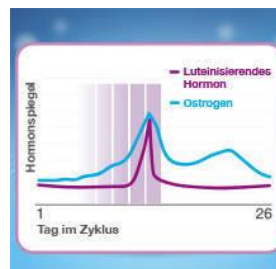

Es ist der einzige Ovulationstest, der Östrogen und das luteinisierende Hormon (LH) misst. Der Östrogenspiegel steigt in den wenigen Tagen vor dem Eisprung an, dann wenn Ihr Körper sich auf die Empfängnis vorbereitet und wenn

Leicht ablesbare digitale Ergebnisse



Ein „blinkender Smiley“ bedeutet, dass Sie am heutigen Tag eine hohe Chance auf eine Empfängnis haben und dass Ihre zwei fruchtbarsten Tage kurz bevorstehen. Ein „statischer Smiley“ bestätigt, dass Sie die maximale Fruchtbarkeit erreicht

als traditionelle
Kalendermethoden.**

**Vergleich einer einfachen
Kalendermethode mit der
Wahrscheinlichkeit, einen Test an
einem Tag mit LH-Anstieg
durchzuführen (Ellis J., et al. Hum
Repro (2011) 26: 176)

können und mehr
Gelegenheiten zum
Schwanger werden
haben.*

*In einer Studie mit 87 Frauen
wurden in 80 % der Zyklen vier
oder mehr fruchtbare Tage
erkannt. Gemessen an
tatsächlichen Zykluslängen
(2012).

die Spermien in der
dadurch geschaffenen
„spermien-
freundlichen“
Umgebung überleben
können. Ein Anstieg
des LH findet 24-36
Stunden vor dem
Eisprung statt. Er löst
letztlich aus, dass das
befruchtungsfähige Ei
freigesetzt wird.

haben (der Smiley wird
konstant für 48
Stunden angezeigt) –
so müssen Sie keine
Linien interpretieren,
um zu wissen, wann
die beste Zeit für ein
Baby ist.

Anwendung

Erster Schritt



Richten Sie den Pfeil
auf dem
Ovulationsteststäbchen
auf den Pfeil auf der
Testhalterung aus und
führen Sie das
Teststäbchen so weit
ein, bis es hörbar
einrastet. Warten Sie
auf das „Test bereit“-
Symbol und führen Sie
sofort den Test durch.

Zweiter Schritt



Halten Sie das
Teststäbchen mit der
saugfähigen
Testspitze nach unten
genau drei Sekunden
lang in Ihren Urinstrahl
oder tauchen Sie es
15 Sekunden in eine
aufgefangene
Urinprobe.

Dritter Schritt



Innerhalb von einer
Minute fängt das
Symbol „Test bereit“
an zu blinken und
zeigt so an, dass der
Test läuft.

Vierter Schritt



Nach fünf Minuten
können Sie Ihr
Ergebnis ablesen –
niedrige, hohe oder
maximale
Fruchtbarkeit. Lesen
Sie vor der
Verwendung immer
die vollständige
Gebrauchsanleitung.