

Anwendung von EvoTears®

1. Entfernung der Verschlusskappe.

2. **Vor der erstmaligen Anwendung:**

Entfernung und Entsorgung des Versiegelungsrings.



3. Flasche mit der Tropferspitze nach oben halten und leicht zusammendrücken.



4. **Bevor die Flasche zum Auge geführt wird:** Gedrückte Flasche mit der Tropferspitze nach unten drehen und anschließend **sofort** den Druck lösen. Luft strömt in die Flasche.



5. Flasche weiterhin mit der Tropferspitze nach unten halten und über das Auge führen. Durch einen **leichten Druck** auf die Flasche nur einen Tropfen in jedes Auge geben.



6. Verschließen der Flasche.