

AUDISPRAY[®]

ULTRA

BOUCHONS DE CÉRUMEN
OHRENSCHMALZPFROPFEN
TAPONES DE CERUMEN
TAPPI DI CERUME
ROLHÕES DE CERA
DOPURI DE CEARÄ
OORSMEERPROPPEN
VAXPROPPAR I ÖRONEN
KORVAVAHATULPPIEN POISTOON

INCI : Acqua, ethoxydiglycol, sodium dioctyl sulfosuccinate, phenoxyethanol, triethanolamine.

Laboratoires Diepharmex S.A.
Avenue Rosemont, 8
1208 Geneva, Switzerland
Tel: +41 (0) 22 718 64 20
info@diepharmex.com

AUDISPRAY.COM

20ml e





2°C

40°C



ASUNOT08-2019 Rev. D16432

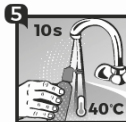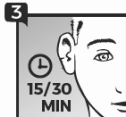

FR

BOUCHONS DE CÉRUMEN

FORME

Spray auriculaire. Flacon non pressurisé de 20ml muni d'une pompe doseuse, utilisable dès 3 ans.

PROPRIETES

Le dioctyl sulfosuccinate de sodium dissocie les éléments constitutifs du cérumen en bouchon ou en amas.

L'éthoxydiglycol dissout les lipides constituant le cérumen.

INDICATIONS

Traitement des bouchons ou amas de cérumen. Facilite l'extraction par le médecin des bouchons de cérumen.

MODE D'ADMINISTRATION

Pour l'élimination d'un bouchon ou amas de cérumen : 2 pulvérisations 2 fois par jour, pendant 5 jours. Avant l'extraction d'un bouchon par un praticien : 4 pulvérisations dans le conduit auditif, 15 à 30 min avant l'extraction.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'otite, de perforation tympanique et de manière générale chez toute personne ayant ou ayant eu des problèmes d'oreille (vertiges, antécédents médicaux ou chirurgicaux...).

Ne pas utiliser en cas d'allergie à un des composants.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Éviter le contact avec les muqueuses notamment oculaires, sinon rincer abondamment à l'eau.

AUDISPRAY ULTRA est un Dispositif Médical
Tout incident grave survenu en lien avec AUDISPRAY ULTRA devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi.

DE

OHRENSCHMALZPFROPFEN

FORM

Ohrenspray: 20-ml-Sprühflasche ohne Treibgas, mit Dosterpumpe, anwendbar ab 3 Jahren.

EIGENSCHAFTEN

Das Docusat-Natrium löst die Bestandteile des Ohrenschmalzpfropfens oder einer Cerumenansammlung auf.

Das Ethoxydiglycol löst die Lipide im Ohrenschmalz auf.

INDIKATIONEN

Behandlung von Ohrenpfropfen oder grösseren Ansammlungen von Ohrenschmalz. Erleichtert die Entfernung von Ohrenpfropfen durch den Arzt.

ART DER ANWENDUNG

Zur Beseitigung von Ohrenpfropfen oder grösseren Ansammlungen von Ohrenschmalz: 2 Sprühstöße zweimal täglich, während 5 Tagen.
Vor der Extraktion eines Ceruminalpfropfens durch den Arzt: 15 bis 30 Min. vor der Behandlung 4 Sprühstöße in den Gehörgang geben

GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei Mittelohrentzündung, Trommelfellperforation und im Allgemeinen Personen, die eine Vorgeschichte mit Ohrenleiden (Schwindel, medizinische oder chirurgische Eingriffe...) haben oder hatten.

Nicht anwenden im Falle einer Allergie gegen einen der genannten Bestandteile.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM GEBRAUCH

Kontakt mit Schleimhäuten, insbesondere mit der Augenschleimhaut, vermeiden; bei Kontakt sofort mit reichlich Wasser spülen.

AUDISPRAY ULTRA ist ein Medizinprodukt
Alle schwerwiegenden, mit AUDISPRAY ULTRA zusammenhängenden Zwischenfälle müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes gemeldet werden, in dem der Benutzer wohnhaft ist.