

Gebrauchsanweisung

Befeuchtet und erfrischt strapazierte Augen.

Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von harten und weichen Kontaktlinsen.

Herba-Vision® *Blaubeere*

15 ml Augentropfen (Musterpackung: 5 ml)

Benetzungslösung für das Auge mit 0,05 % Blaubeertinktur, hergestellt gemäß HAB 2000.

Herba-Vision® Augentropfen Blaubeere befeuchten und erfrischen müde, strapazierte Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, den Aufenthalt in verrauchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

Zusammensetzung:

1 ml isotonische Pufferlösung enthält
0,5 mg Blaubeertinktur (HAB 2000)
0,001 mg Polyhexanid
0,1 mg EDTA
3 mg HPMC (Methocel®)

Medizinprodukt
CE 0473

Anwendung:

Bei Bedarf 1–2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

Hinweise:

Kühl und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem Öffnen zwei Monate haltbar. Nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Tropferspitze nicht berühren. Nach Gebrauch verschließen. Immer frische Lösung verwenden. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

Stand der Information:

Februar 2007



OmniVision GmbH
Lindberghstrasse 7
D-82178 Puchheim